

# TOMORROW


teste pré-natal não invasivo

## INSTRUÇÕES DE COLHEITA

Antes de proceder à colheita, por favor leia atentamente as instruções a seguir descritas.

### PROCEDIMENTO:

1. A colheita terá que ser realizada para um tubo **Streck** (ref: Cell-Free DNA BCT® CE).
2. Identifique o Tubo Streck com **no mínimo 2 identificadores**, por exemplo, nome e data de nascimento da grávida;
3. Esterilize a região de colheita e recolha entre **7–10 mL** de sangue para o Tubo Streck por método de vácuo;
4. Imediatamente após colheita, agite cuidadosamente os tubos 8 a 10 vezes (mistura inadequada ou tardia poderá condicionar o resultado do teste);
5. A amostra deve ser mantida e transportada à temperatura ambiente (20-25°C);
6. Certifique-se que a entrega no CGC Genetics PORTO é feita **em 24h após colheita**.

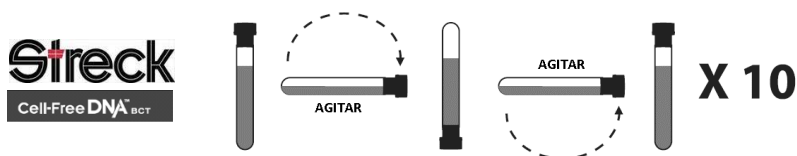

### ATENÇÃO, o teste não pode ser realizado se:

- A amostra de sangue for inferior a 7 mL;
- O tubo não estiver adequadamente identificado;
- O Formulário de Requisição **TOMORROW** não estiver devidamente preenchido e assinado pelo médico requisitante;
- O Consentimento Informado da Grávida não estiver assinado pela mesma.

- Para encontrar respostas às perguntas mais frequentes, consulte [www.tomorrowtest.com](http://www.tomorrowtest.com)
- Para mais informações, envie um email para [tomorrow@cgcgeneitics.com](mailto:tomorrow@cgcgeneitics.com) ou ligue 223 326 608, de segunda a sexta, entre as 9h e as 20h.