

Antes de proceder a la toma, por favor lea atentamente las instrucciones descritas a continuación:


PROCEDIMIENTO:

1. Recoja la muestra de sangre en un tubo **Sireck** (ref.:Cell-FreeDNABCT©CE).
2. Identifique el Tubo Streck con un **mínimo de 2 identificadores**, por ejemplo, nombre y fecha de nacimiento de la paciente;
3. Esterilice la región de toma y recoja entre **7–10mL** de sangre para el Tubo Streck por sistema de vacío;
4. Inmediatamente después de la toma, agite cuidadosamente los tubos de 8 a 10 veces (una mezcla inadecuada o tardía podría condicionar el resultado del test);
5. La muestra debe ser mantenida y transportada a temperatura ambiente (20-25°C, 68-77°F);
6. Asegúrese que la entrega se realice en un **máximo de 4 días después de la toma en:**

CGC Genetics/Centro de Genética Clínica

Rua Sá da Bandeira, 706-1o

4000-432 Porto, Portugal

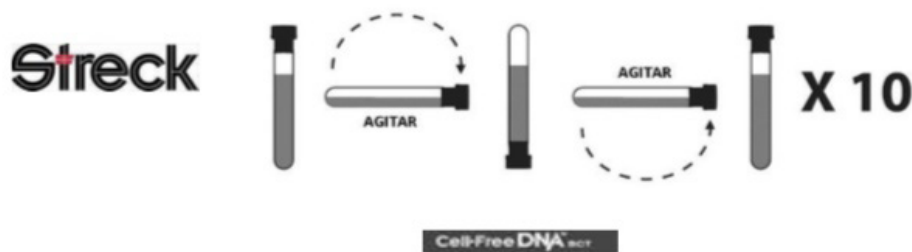

ATENCIÓN, EL TEST NO PUEDE SER REALIZADO SI:

- La muestra de sangre es inferior a 7 mL;
- El tubo no está identificado adecuadamente;
- La Hoja de Solicitud **TOMORROW** no está debidamente rellenado y firmado por el medico prescriptor;
- El Consentimiento Informado de la Paciente no está firmado por la misma.

Para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes, consulte www.tomorrowtest.com

Para más información, envíe un email a customercare@cgcgenetics.com o llame al +351 223 389 900, de lunes a viernes 09:00-18:00 (GMT/UTC + 00:00).